
PŁUCZKO-DEZYNFEKTORY

Płuczko-dezynfektory linii CLINOX są przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji kacek oraz basenów, innych pojemników sanitarnych, takich jak miski nerkowate, wiadra itp. Eliminuje to konieczność ręcznego opróżniania w/w naczyń oraz ich dezynfekcji, co oszczędza czas, miejsce i koszty. Płuczko-dezynfektory CLINOX 3A zmniejszają zużycie energii nawet o 30% przy jednoczesnej poprawie osiągnięć. Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane dla szpitali, domów opieki i prywatnych klinik. Są idealnym rozwiązaniem przy wyposażaniu brudowników (nawet tych o małej powierzchni) w oddziałach szpitalnych, izolatkach oraz węzłach sanitarnych.

CLINOX 3A

Płuczko-dezynfektory

Dzięki innowacyjnemu projektowi CLINOX 3A jest dzisiaj przykładem nowoczesnej i zaawansowanej technologii. Gwarantuje 100% automatyczną obsługę bez użycia rąk, pełną eliminację bakterii i zarodników, nawet najbardziej opornych, w tym Clostridium Difficile. Wszystko to jest możliwe dzięki 12 dyszom ze stali nierdzewnej (w tym 4 obrotowym) oraz dzięki połączeniu działania specjalnego programu sporobójczego wraz z opatentowanym płynem.

Płuczko-dezynfektory Clinox 3A są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, mocną strukturą oraz jednoczęściową komorą mycia z zainstalowanym systemem samoczyszczącym. Charakteryzują się wielofunkcyjnością oraz dbałością o bezpieczeństwo użytkowania.

AUTO



TOTAL



	AUTO	TOTAL
Model	100% automatyczny.	
Otwieranie/Zamykanie	Automatyczne za pomocą przycisków nożnych. Bez użycia rąk.	
Start	Automatyczne opróżnianie basenu i start programu mycia i dezynfekcji.	
Cykle	Standardowy, intensywny.	Standardowy, intensywny, SPOROBÓJCZY .
Kontrola poziomu detergentu	Alarmy wizualne i dźwiękowe.	
Ekran	7" kolorowy ekran dotykowy.	
Porty	Standardowy port RJ45. WiFi opcjonalne.	

NA CZYM POLEGA WYJĄTKOWOŚĆ MYJNI CLINOX 3A ?



Ładowanie basenu trzymając go za uchwyt:

- Brak manipulacji i obracania
- Brak ryzyka przenoszenia zakażeń

Funkcja tradycyjnego zlewu z wbudowanym systemem splukiwania

CLINOX 3A TOTAL

Płuczko-dezynfektor

TRZY FAZY PROCESU MYCIA

I – USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Po zamknięciu pokrywy do komory urządzenia przez 12 dysz wtłaczana jest zimna woda pod ciśnieniem 4 bar, aby usunąć zanieczyszczenia wewnątrz mytych naczyń.

II – WŁAŚCIWY PROCES MYCIA

Po fazie mycia wstępnego zimną wodą do komory wtłaczana jest woda gorąca pod ciśnieniem 4 bar. W tym momencie podawany jest detergent i środek zmiękczający wodę. W tej fazie usuwane są wszelkie plamy i trudne do usunięcia zabrudzenia.

III – DEZYNFEKCJA TERMICZNA

Dezynfekcja termiczna zachodzi przy użyciu pary wodnej o temperaturze 90°C. Czas utrzymania temperatury 90°C zależy od wybranego programu, dla którego przypisana jest odpowiednia wartość parametru A0 (A0-60, A0-600, A0-600 + dezynfekcja chemiczna – program sporobójczy).

STEROWANIE KOMPUTEROWE

Procesor steruje całą elektroniką, procesem mycia i dezynfekcji. Funkcja samodiagnozy pozwala na zbieranie i rejestrowanie danych dotyczących użytkowania płuczki, jej stanu oraz samego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

ERGONOMIA

- Załadunek od góry: **oszczędność miejsca w brudowniku**
- Łatwy i bezpieczny załadunek basenów (bez potrzeby obracania podczas umieszczania w koszu)

HIGIENA

- Umożliwia wylewanie wszelkich nieczystości bezpośrednio do komory: **może być wykorzystywana jak tradycyjny zlew**
- Regulowane nóżki dla lepszej stabilności oraz łatwego czyszczenia podłogi pod urządzeniem
- Dezynfekcja termiczna parą po każdym myciu, a następnie chłodzenie strumieniem zimnej wody dla lepszej wentylacji

BEZPIECZEŃSTWO PROCESU

- **Bezdotykowa obsługa za pomocą przycisków nożnych**
- W fazie chłodzenia i wentylacji, urządzenie blokuje się dodatkowo na 1 minutę 30 sekund dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- **Komora jako głęboko tłoczony monolit** dla eliminacji miejsc, w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia (np. biofilmy)
- Możliwość konfiguracji ustawień zabezpieczona kodem
- Kontrola mikroprocesorowa, port RJ45

ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKIMI NORMAMI

- Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC
- Posiada certyfikaty: EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-3, EN ISO 15883-5, EN ISO 13485 i EN 13697

PORĘCZNOŚĆ

- **Informacja i kontrola za pomocą kolorowego wyświetlacza 7"** (data, nr cyklu, faza cyklu, temperatura, wartość A0 ...) dostępne w czasie rzeczywistym bez potrzeby manipulacji i kontaktu z dłonią
- **Wbudowana i zintegrowana pompa detergentu z informacją o ilości środka**
- **Różnorodność koszy (uchwytów) do mycia naczyń sanitarnych** (basenów, wiader, kaczek, butelek na mocz, nakładek na toalety itp.). Górne ładowanie oferuje dużą pojemność mycia, a wielofunkcyjne wyposażenie daje możliwość mycia i dezynfekcji większości naczyń sanitarnych wykorzystywanych w oddziałach szpitalnych.

PODSTAWOWY KOSZ:

- 1 x basen z pokrywą
- 2 x kaczki



DODATKOWE KOSZE ZAŁADOWCZE



Kosz na 6 kaczek / butli



Wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiadra)



Uchwyt na nocnik



Kosz do dezynfekcji 3 basenów



Kosz na elementy szklane



Kosz na 5 misek nerkówek






PARAMETRY TECHNICZNE


- Wymiary: szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm
- Waga: 95kg
- Odływ: 100mm
- Zasilanie: 400V/50Hz 3N+PE, 10A lub 230V/50Hz 1N+PE, 16A
- Moc całkowita: 3000W
- Podłączenie zimnej wody: 3/4"
- Ciśnienie min.: > 1.0bar
- Natężenie przepływu: 16l/min.
- Podłączenie ciepłej wody: 3/4"
- Ciśnienie min.: > 1.0bar
- Natężenie przepływu: 16l/min.
- Temperatura min/max: 40°C – 60°C
- Poziom hałasu: 50dB

WARUNKI INSTALACYJNE


- Odływ kanalizacyjny Ø100 w podłodze lub ścianie (na wysokości max. 25cm)
- Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej: rura 3/4"
- Instalacja elektryczna: 3-fazowa

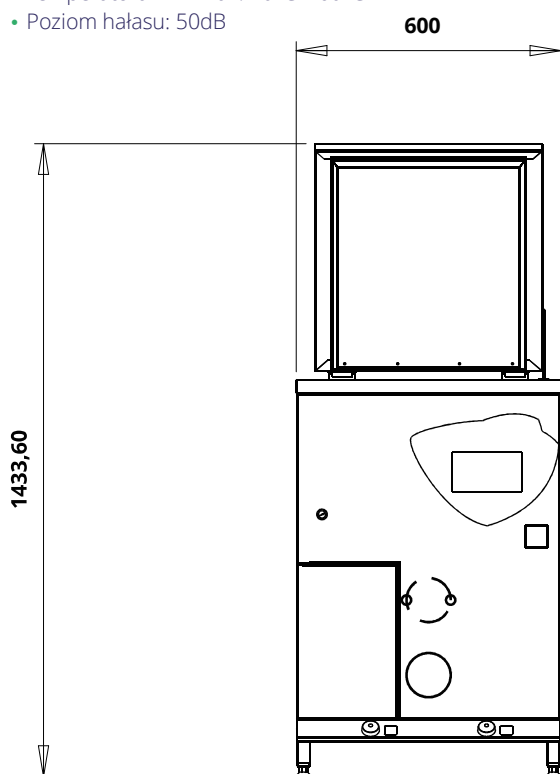

WIDOK Z PRZODU

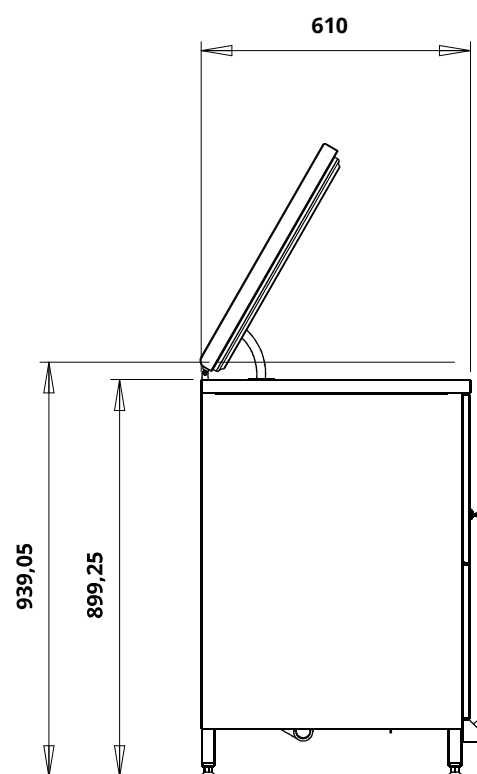

WIDOK Z BOKU

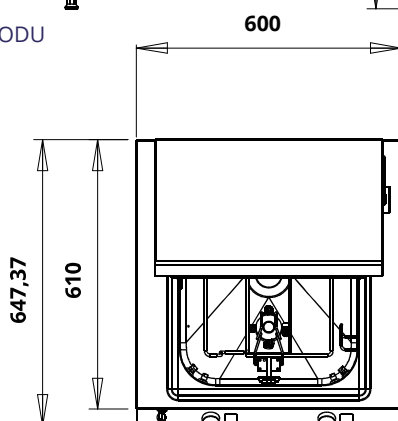

WIDOK Z GÓRY